



DIGALVANO GOLDBAD

– UND SPEZIALITÄTEN FÜR DIE DENTALE GALVANOTECHNIK

INDIKATIONSGERECHT • SICHER • PREISWERT • SERVICEORIENTIERT



Highlights

- 99,9% reines Gold
- warmer Goldfarbton
- geringe Wandstärke
- hervorragende Ästhetik
- Goldbad mit integriertem Glanzzusatz
- 100% Ausarbeitbarkeit des Goldbades
- 50% Metallerparnis im Vergleich zur Gusstechnik
- Geeignet für alle gängigen Galvanogeräte
- Made in Germany CE 0197

Indikationen

- Einzelkronen
- Verblockungen
- Implantatprothetik und Stege
- Sekundärkronen (Doppelkronentechnik)

Die dentale Galvanotechnik zeichnet sich besonders durch eine sehr gute Gewebeverträglichkeit, einen warmen Farbton, der die Grundlage für eine hervorragende Ästhetik schafft, sehr gute Passgenauigkeit und damit verbunden einen optimalen Randschluss (ca. 18µm) aus. Die erheblich reduzierte Plaqueaffinität und der sehr gute Randschluss sind wissenschaftlich belegt. Zur dentalen Galvanotechnik liegen positive klinische Erfahrungen seit 1986 vor. Somit verbindet die dentale Galvanotechnik die ästhetischen Vorteile der Vollkeramik mit den biologischen Vorteilen des reinen Goldes.

Testen Sie unverbindlich! Sollte unser DiGOLD Classic nicht Ihren Erwartungen entsprechen, garantieren wir Ihnen volles Rückgaberecht, auch für angebrochene Flaschen, Köppchen und Goldfahnen.



BESTELLSHOTLINE 040 25 77 67 570

Das Goldbad DiGOLD Classic von DENTALimpulse ist in allen gängigen Galvanogeräten* verwendbar und ab Lager lieferbar. Bestellungen die bis 15.00 Uhr eintreffen, werden am selben Tag per Expresslieferung – die Zustellung erfolgt am kommenden Werktag vor 12.00 Uhr - ohne Versandkosten versendet. Die Bezahlung per Lufthansa Miles & More Creditcard ist möglich. DiGOLD Classic Goldbäder werden als Gebinde á 500 ml angeboten. Den aktuellen Preis €/g entnehmen Sie bitte der jeweilig aktuellen Legierungspreisliste oder unseren Internetseiten unter www.dentalimpulse.de

DENTALimpulse

BERATUNGS- UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Sülldorfer Kirchenweg 131
D 22589 Hamburg
Telefon 040 25 77 67 570
Freefax 0800 879 30 29



DiGOLD CLASSIC

99,9% REINES GOLD. GOLDBAD MIT INTEGRIERTEM GLANZZUSATZ

CE 0197

Dentales Goldbad zur metallkeramischen Verblendung
gemäß DIN EN ISO 22674

Artikelnummer 40000
Typ 1 (weich), goldgelb

ZUSAMMENSETZUNG (Massengehalt in %)

Au	Ag	Cu	Fe	Ga	In	Ir	Mn	Nb	Pd	Pt	Rh	Ru	Ta	Ti	Sn	Zn
Gold	Silber	Kupfer	Eisen	Gallium	Indium	Iridium	Mangan	Niob	Palladium	Platin	Rhodium	Ruthenium	Tantal	Titan	Zinn	Zink
> 99,9	-	< 0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDIKATIONEN

Farbe	feingold
Typ	weich
Inlays, Onlays	X
Kronen	X
Verblockungen	X
Doppelkronen	X
Kleine Brücken	X
Keramikverblendfähig	X
Kunststoffverblendfähig	X

TECHNISCHE DATEN / LIEFERFORM

Dichte in g/cm ³	19,3
Arbeitstemperatur °C	60
Badbewegung	erforderlich
Schmelzpunkt °C	1063
WAK 25-500°C 10 ⁻⁶ K ⁻¹	15,5
Härte nach der Abscheidung	~ 155
E-Modul in kN/mm ²	80
Lieferform	Flasche á 500 ml
Goldinhalt per 500 ml	7,5 g

DiGOLD CLASSIC ist ein wirtschaftliches Premium-Dentalgoldbad made in Germany zur galvanischen Abscheidung von reinem Gold. DiGOLD CLASSIC kann in nahezu allen gängigen Galvanogeräten* entsprechend den Angaben der jeweiligen Hersteller ohne Zugabe von Aktivator/ Glanzzusatz eingesetzt werden. Dies spart Zeit, Geld und bietet mehr Sicherheit in der Verarbeitung. DiGOLD Classic ist ein Goldsulfidbad (Cyanidfrei) dessen Zusammensetzung erprobt und sicher ist; ein Klassiker und den dentalen Goldbadtypen.


Weiteres Zubehör:

SILVERWHIFF (Leitsilberlackspray), Leitsilberlack Classic, Kontaktstäbe, Kleber etc. runden unser Galvanosortiment für Sie ab.

Mit dem **DiGOLD Härter** werden die erreichbaren Härtewerte des Goldbad DiGOLD Classic auf bis zu 220 HV gesteigert. Positiver Nebeneffekt ist die Bildung einer deutlich glatteren und glänzenderen Oberfläche.



Der **DiGOLD Aktivator** sorgt bei dem Goldbad DiGOLD Classic für noch optimalere Abzugskräfte durch eine verbesserte Passung der Galvanoteleskope auf NEM-Primärteilen.

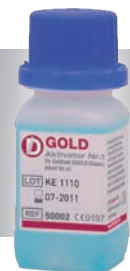

VERTRÄGLICHKEIT

DiGOLD CLASSIC ist frei von Nickel, Blei, Cadmium und Beryllium. Unabhängige Prüfinstitute belegen: keine cytotoxischen Effekte! DiGOLD CLASSIC ist körperverträglich und sicher. Keine Hautirritationen, keine allergische Sensibilisierung.

ZERTIFIZIERUNG

DENTALimpulse GmbH unterliegt den strengen Anforderungen der europäischen Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG und des deutschen Medizinproduktegesetzes (MPG) und ist nach EN ISO 13485 und zusätzlich nach EN ISO 9001 zertifiziert.

* DiGOLD CLASSIC mit 7,5g ausarbeitbarem Gold per 500ml eignet sich für folgende Galvanogeräte:

WIELAND AGC® Micro, WIELAND AGC® Micor Plus, Heraeus Preciano® CL-GF, Heraeus Preciano® IQ, Degudent Solaris®, Gramm Gammat® free, Gramm Gammat® easy, Gramm Gammat® 11c, Gramm Gammat® Optimo 2, Metalor Scopeform® Easy, Trendgold® Genius I, Trendgold® Genius II, Trendgold® Genius perfekt, Schütz L-Form®, Schütz L®-FormS und Auromed Auroform.

AGC®, DiGOLD®, Gammat®, L-Form®, L-FormS®, Preciano®, Solaris®, Scopeform® und Trendgold® sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

DENTALimpulse

BERATUNGS- UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Sülldorfer Kirchenweg 131
D 22589 Hamburg
Telefon 040 25 77 67 570
Freefax 0800 879 30 29